


Unité de prélèvement à ailettes


Sécurité BD Safety-Lok™

Recommandations d'utilisation

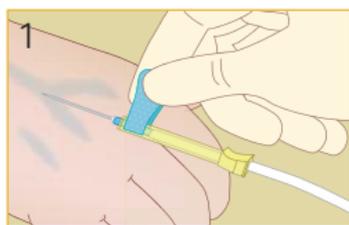

1 Effectuer la ponction en maintenant l'unité de prélèvement par les ailettes.


Puis réaliser le prélèvement de sang suivant votre technique habituelle.

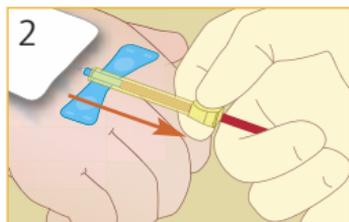

2 Une fois le prélèvement terminé, placer une compresse, **sans appuyer** sur le site de ponction.

Saisir l'embase de l'étui protecteur jaune entre le pouce et l'index, et la tubulure avec les autres doigts.

Dépiquer.

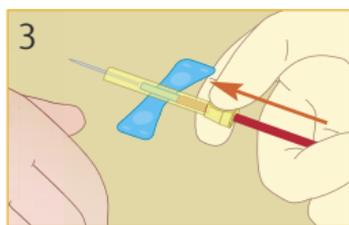

3 Maintenir la tubulure et pousser l'étui protecteur jaune vers l'avant, en tendant le pouce et l'index. L'aiguille coulisse à l'intérieur de l'étui jaune.



4 Le "clic" sonore en bout de course confirme la neutralisation complète de l'aiguille, en position verrouillée dans l'étui protecteur.



5 Eliminer l'ensemble du système dans le collecteur prévu à cet effet.

Becton Dickinson France S.A.S. Société par Actions Simplifiée au capital de 62 823 000 euros.
RCS Grenoble B 056 501 711 - Siret 056 501 711 00115.

BD, Le Pont de Claix, 38800, FR

bd.com/fr

