



La mesure des constantes chez le nouveau-né est effectuée à la naissance au cordon à partir d'un prélèvement veineux et d'un prélèvement artériel.

### Matériel :


- 2 seringues héparinées Safe Pico Aspirator fournies par le laboratoire (Ref. : 956-622)
- 2 aiguilles BD Eclipse (Ref. : 305892)
- Bon de prescription rose « **prescription urgente** »

### Vérification avant prélèvement :

Pendant la phase de préparation de l'accouchement, le préleveur doit s'assurer par une question ouverte de l'identité de la mère et la concordance avec les étiquettes d'identification. Dans tous les cas, coller l'étiquette de la mère pour information sur le bon de prescription (en bas à droite).

### Prélèvement :

1. Deux prélèvements distincts sont réalisés sur le cordon et identifiés : prélèvement veineux et prélèvement artériel.
2. Asepsie de la zone de prélèvement avec antiseptique adapté.
3. Retirer la seringue de l'emballage et suivre les recommandations indiquées par le fournisseur (cf. ci-dessous) pour le remplissage de la seringue.

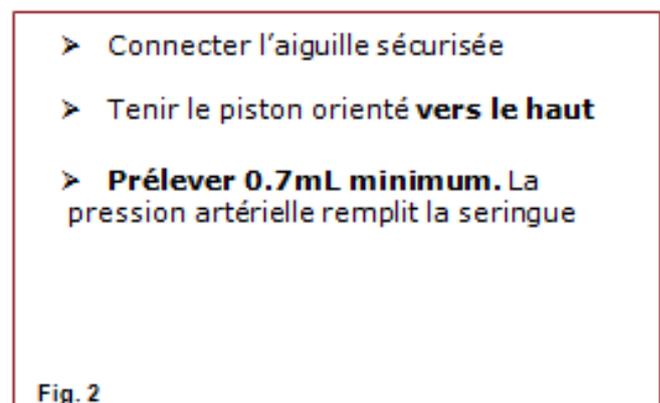



### Identification des prélèvements effectués :

→ **Si l'enregistrement du nouveau-né a été réalisé :**

Coller l'étiquette du nouveau-né sur la seringue identifiée cordon veineux

Coller l'étiquette du nouveau-né sur la seringue identifiée cordon artériel

Coller l'étiquette du nouveau né sur le bon de prescription

→ **Si le nouveau-né n'est pas enregistré et ne possède pas d'étiquette à son identité :**

Les renseignements sont ajoutés au stylo :

**NOM du NNE :**

**PRENOM NNE :** si absence de prénom noter BEBE MASCULIN ou BEBE FEMININ

**Les deux seringues seront identifiées distinctement et en adéquation avec le bon de prescription**

**Le préleveur surligne au stylo le code de l'analyse et le type de prélèvement cordon veineux et/ou artériel.**

**Le préleveur s'identifie, signe, date et note l'heure de réalisation du prélèvement.**