


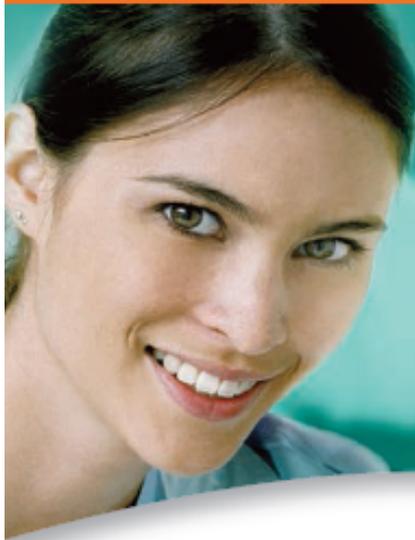

La phase Préanalytique, une étape clé



Ordre de prélèvement des tubes BD Vacutainer®

Recommandations CLSI, H3-A6, 2007
et GEHT 2007 (www.geht.org)

CECI N'EST PAS
UN TUBE,
C'EST UN PATIENT



- **Port de gants** non stériles.
- **Désinfection** large du site de ponction.
- Ne **jamais palper le site** après désinfection.
- Le **garrot** ne doit être utilisé que pour faire saillir la veine. Le **relâcher** dès que le sang s'écoule dans le 1^{er} tube.
- **Choix du site** de ponction : Ne jamais prélever sur le bras qui est perfusé.
- **Maintenir le tube** en dessous du point de ponction.
- **Lors du prélèvement** positionner le tube, étiquette vers le bas, pour pouvoir visualiser l'arrivée du sang dans le tube.

AIGUILLE



CITRATE



SST



CAT



PST



LH



EDTA



GLUCOSE



AUTRES

UNITÉ À AILETTES



Avec hémoculture



Flacon aérobic



Flacon anaérobic



CITRATE



SST



CAT



PST



LH



EDTA



GLUCOSE



AUTRES

Sans hémoculture



Tube neutre
(sans additif)



CITRATE



SST



CAT



PST



LH



EDTA



GLUCOSE



AUTRES

- Veiller au bon remplissage des tubes.
- Il est recommandé d'**homogénéiser** le tube dès le retrait du corps de prélèvement, par **plusieurs retournements lents**.
- Identifier les tubes.
- Veiller à respecter les conditions recommandées de prélèvement et de transport.

